



Альсария

Медицинские изделия
с микросферами

Мобильный комплекс микросферотерапии «Альсария»

Порядок проведения процедуры

Необходимое оборудование: кушетка

Сеансы микросферотерапии проводит медицинская сестра в соответствии с назначением врача в процедурной карточке

Подготовка комплекса:

1. Перед началом процедуры изделия необходимо встряхнуть, равномерно разгладить.
2. Специалист раскладывает комплекс на кушетке в порядке, показанном на рисунке.



3. При использовании изделий рекомендовано использовать одноразовые (или личные ситцевые) простыни, наволочки, чехлы.

Проведение процедуры:

1. Перед сеансом рекомендуется выпить стакан воды.
2. Пациента укладывают в капсулу, на голову одевают шапку, на глаза – повязку (см. рисунок).
3. Специалист должен убедиться в том, что пациент расположился комфортно и застегнуть капсулу на молнию.
4. Рекомендуемая длительность сеанса 30-40 минут (продолжительность первого сеанса 15-20 минут).
5. Сеансы микросферотерапии проводят ежедневно или через день, на курс лечения назначают от 10 до 20 процедур (ориентируясь на собственные ощущения и состояние пациента).
6. Дополнительно может использоваться аудиотерапия с помощью релаксационной музыки (диски с музыкой прилагаются).

После окончания процедуры:

1. После сеанса изделия необходимо встряхнуть.
2. При затвердении рекомендуется поместить изделия у источника тепла. Восстанавливать изделия таким образом рекомендуется после окончания каждого сеанса пользования.
3. Необходимо сделать перерыв 10-15 минут перед приемом нового пациента.

Меры предосторожности:

- не рвать, не колоть, не подвергать резким нагрузкам (прыжки, падения) для сохранности целостности шва
- не стирать с использованием синтетических моющих средств
- при необходимости провести обработку (протереть поверхность) обычными дезсредствами.